

### Dimensions (repliée):

Largeur: de 6,5 à 17,5 cm

Longueur: 120cm

Epaisseur: 0,5cm

Poids: 340g.

Couleurs: Noire.



### Caractéristiques techniques:

- Nylon 420D doublé PVC noir brillant + spandex en néoprène trois couches.
- Fermeture et serrage par Velcro.


**Produit mis au point sous la direction du professeur Savary (CH d'Annecy - 74)**




Nettoyage à l'eau savonneuse, spray, machine 40°, repassage interdit.

# WILCO

## Ceinture pelvienne

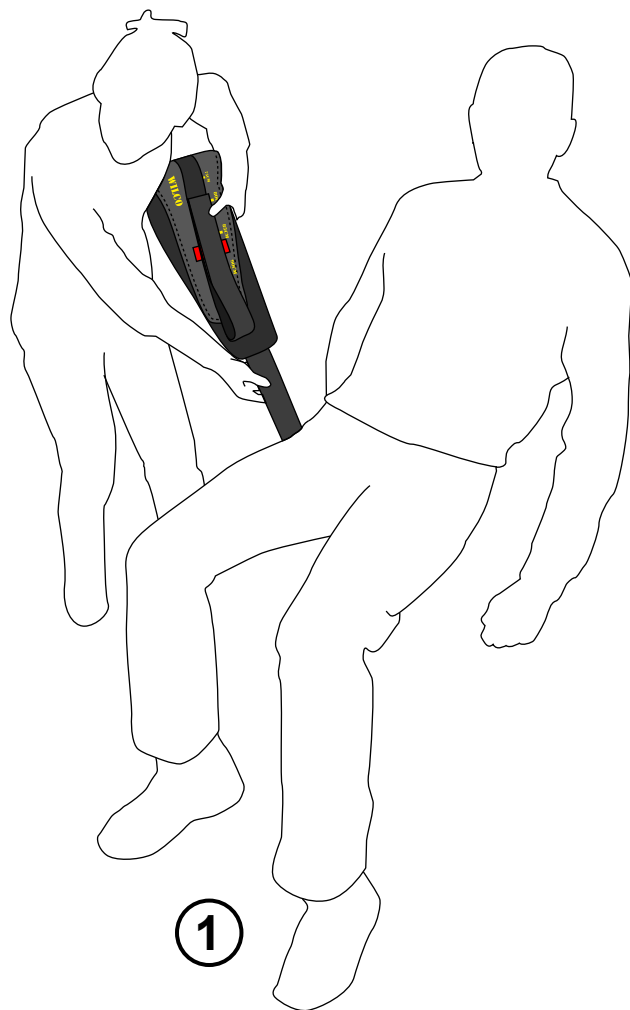


Glisser la ceinture sous la victime  
en utilisant la sangle rigide

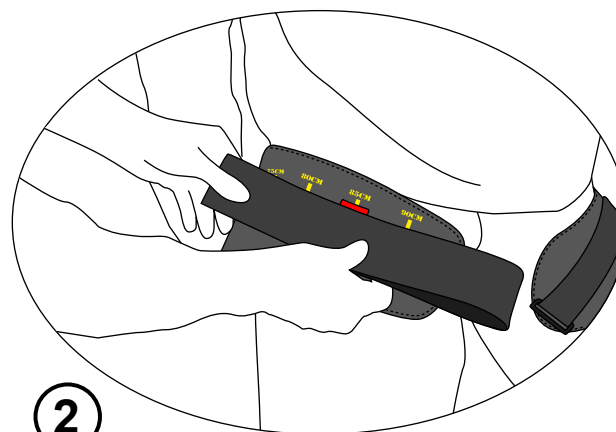


Veiller à bien positionner la ceinture  
au niveau des crêtes iliaques.

Positionner les repères rouges de la  
partie réglable sur la valeur du tour  
de taille estimé de la victime

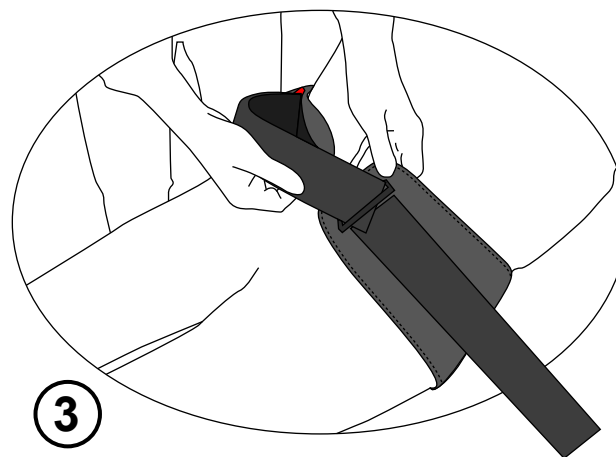

Insérer la sangle dans la boucle rectangulaire

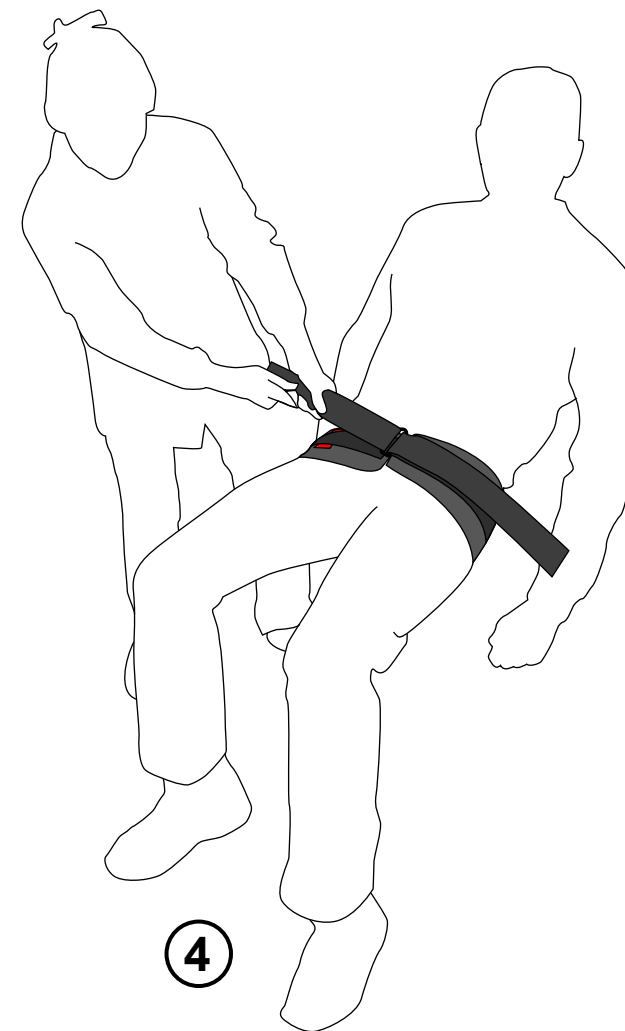

Effectuer le serrage et bloquer la  
sangle en la rabattant sur le velcro.